

# COLPOFIX®

Gel vaginal en spray

Flacon de 20 ml + 10 applicateurs à usage unique

Traitement utile au maintien des conditions physiologiques de la zone de transformation cervico-vaginale en cas d'altérations dues au HPV (Human Papillomavirus)

## DESCRIPTION

**COLPOFIX®** est un dispositif médical innovant par sa formule, son mode d'administration et la forme anatomique de l'applicateur. Le gel vaginal **COLPOFIX®** est pulvérisé en fines gouttelettes pour atteindre facilement et tapisser uniformément la muqueuse cervico-vaginale. Ses propriétés muco-adhésives évitent l'écoulement.

**COLPOFIX®** agit localement par plusieurs mécanismes.

- Grâce à son mode d'administration en spray et à sa capacité d'adhésion, **COLPOFIX®** forme une pellicule qui protège la muqueuse cervico-vaginale de l'action délétère des agents microbiens externes.
- Grâce à ces propriétés hydratantes **COLPOFIX®** contribue au maintien des conditions physiologiques d'une région du col de l'utérus, appelée zone de transformation cervico-vaginale, exposée à des altérations dues au HPV.
- **COLPOFIX®** participe à maintenir un pH favorable au microbiote vaginal.

## COMPOSITION

Eau, Sorbitol, Carboxyméthyl Beta-Glucan, Polymère acrylique réticulé (Polycarbophile), Imidazolidinylurée, Déhydroacétate de sodium.

## PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

La couleur du gel est susceptible de variations. Ce changement de couleur n'altère pas la qualité du produit.

**Le produit est à usage vaginal. Ne pas l'avaler.**

Si vous êtes enceinte ou probablement enceinte, et sous traitements pharmacologiques locaux concomitants, le produit ne devra être utilisé que sur les conseils de votre médecin ou pharmacien.

Le produit n'est pas destiné à un usage pédiatrique. Tenir hors de la vue et de la portée des enfants. L'usage prolongé du produit, comme tous les produits topiques, peut provoquer une sensibilisation ou une irritation locale. Si cela se produit, arrêtez le traitement et consultez votre médecin ou pharmacien.

Ne pas utiliser en cas d'allergie connue à l'un des constituants.

N'utilisez pas le produit si la boîte ou la canule sont abîmées ou présentent des indices d'utilisation en l'ouvrant la première fois.

Ne pas utiliser le produit après la date de péremption.

Utilisez le produit conformément aux conseils d'utilisation.

La canule est à usage unique et ne doit pas être réutilisée.






## CONSERVATION

Conservez dans un endroit sec, éloigné des sources de lumière et de chaleur. La date de péremption indiquée est valable quand le produit est intact et s'il a été conservé correctement.

## CONSEILS D'UTILISATION

### Ne pas agiter le produit avant utilisation.

Retirez un applicateur vaginal de sa protection. Retirez le bouchon du flacon. Insérez l'applicateur dans l'embout distributeur du flacon. Activez le spray en appuyant sur le bouton du distributeur jusqu'à ce que le produit apparaisse. Allongez-vous sur le dos, les genoux pliés, introduisez l'applicateur profondément dans le vagin, et réalisez 5 pulvérisations. Jetez l'applicateur après utilisation. Fermez le flacon avec le bouchon.

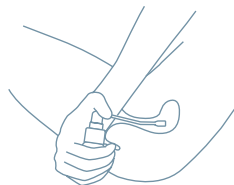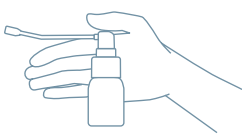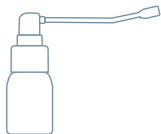

## MODE D'EMPLOI

### Voie vaginale.

Lire attentivement la notice avant utilisation.

1 application par jour, à raison de 5 pulvérisations de spray, le soir avant de se coucher.

À renouveler en fonction des recommandations de votre médecin.

1 boîte correspond à 10 jours d'utilisation.

## EFFETS INDÉSIRABLES

N'utilisez pas le produit en cas d'hypersensibilité et d'incompatibilité avec l'un de ses ingrédients. Les tests réalisés sur le produit n'ont, à ce jour, montré aucune sensibilisation ou d'autres effets secondaires. En cas de gêne persistante, consultez votre médecin.

## PRÉSENTATION

La boîte contient un flacon de 20 ml et 10 applicateurs vaginaux jetables, emballés individuellement. Chaque applicateur est à usage unique.

Dispositif médical  
Révision Mai 2020  
Date de marquage CE : 09/2020



Uriach Italy, S.r.l. A SOCIO UNICO  
Assago Milanofiori, Str. 1, Pal. F5  
20090 Assago (MI)

Distributeur : **Laboratoires IPRAD PHARMA**  
174, quai de Jemmapes 75010 Paris - France  
[www.laboratoiresiprad.com](http://www.laboratoiresiprad.com)



CANULE PLASTIQUE  
À JETER  
ÉTUI CARTON, FLACON PLASTIQUE  
ET NOTICE PAPIER À RECYCLER



0373

Laboratoires  
**IPRAD**