

# céru**baby**™

## Solution auriculaire

Veuillez lire attentivement ces instructions d'utilisation avant d'utiliser ce produit.

### 1. Qu'est-ce que Cérubaby™ et dans quels cas est-il utilisé ?

Le cérumen est une substance huileuse naturelle produite pour protéger le tympan. Le cérumen piège des particules extérieures qui se logent dans le conduit auditif et le cérumen se déplace le long du conduit de l'oreille, jusqu'à son ouverture, où il est expulsé.

Chez certaines personnes, ce cérumen peut s'accumuler, pouvant entraîner une douleur dans l'oreille ou une perte partielle de l'audition.

L'huile d'olive est un lubrifiant naturel qui ramollit en douceur l'excès de cérumen et ainsi prévient l'accumulation de cérumen.

Les gouttes auriculaires **Cérubaby™** peuvent être utilisées :

- dès la naissance,
- pendant la grossesse,
- pendant l'allaitement.

\* L'avis d'un professionnel de santé est conseillé avant utilisation des gouttes **Cérubaby™** chez un enfant de moins de 5 ans.

### 2. Quelles sont les informations à connaître avant d'utiliser Cérubaby™ ?

Ne pas utiliser en cas :

- d'allergie ou sensibilité à l'huile d'olive,
- d'infection, d'inflammation ou de saignements de l'oreille ou si le tympan est rompu.

### 3. Comment utiliser la solution auriculaire Cérubaby™ ?

- Vérifiez que l'embout et le flacon ne sont pas endommagés ou cassés avant toute utilisation.
- Inclinez la tête sur le côté, pour orienter l'oreille à traiter vers le haut.
- Évitez de toucher l'oreille avec l'embout, et ne pas l'introduire dans le canal auditif.
- Déposez 2 à 3 gouttes dans l'oreille et massez délicatement l'extérieur de l'oreille.
- Laissez quelques minutes pour que les gouttes atteignent le tympan, en gardant la tête inclinée.
- Si nécessaire, bouchez légèrement l'oreille avec du coton pour éviter les fuites.
- Pour enlever l'huile, inclinez la tête pour orienter l'oreille traitée vers le bas et laissez l'huile s'écouler. Essayez délicatement l'extérieur de l'oreille pour enlever les résidus.
- Après utilisation, essuyez délicatement le compte-gouttes avec un coton propre.
- Utilisez les gouttes 2 fois par jour pendant 7 jours maximum.
- Répétez le traitement avec l'autre oreille si nécessaire.
- Un professionnel de santé peut vous donner des instructions spécifiques concernant l'utilisation des gouttes en fonction de la gravité du problème causé par le cérumen. Il est conseillé de suivre ses instructions pour assurer l'élimination du cérumen.

### 4. Avertissements

- Les enfants doivent avoir reçu l'avis d'un professionnel de santé avant d'utiliser la solution auriculaire.

- Consultez votre médecin ou votre pharmacien si vous utilisez tout autre traitement dans vos oreilles.
- Ne pas utiliser **Cérubaby™** si vous êtes allergique ou sensible à l'huile d'olive.
- Ne pas utiliser **Cérubaby™** si l'oreille est infectée, enflammée ou saigne ou si le tympan est rompu.
- Il n'y a pas d'effets secondaires connus lors de l'utilisation de l'huile d'olive mais si vous ressentez une irritation ou d'autres effets, arrêtez l'utilisation et prévenez votre médecin ou votre pharmacien.
- Évitez le contact avec les yeux. En cas de contact accidentel, rincez abondamment à l'eau claire et consultez un médecin.
- Si les symptômes persistent, consultez votre médecin.
- S'assurer de l'intégrité de la bague d'inviolabilité avant la première utilisation.

Tout incident grave survenu avec le dispositif médical devrait être notifié immédiatement à East Midlands Pharma Ltd et à l'ANSM

#### **TENIR HORS DE LA VUE ET DE LA PORTÉE DES ENFANTS.**

#### **POUR USAGE EXTERNE UNIQUEMENT.**

#### **5. Comment conserver Cérubaby™?**

- À conserver entre 10°C et 25°C.
- Ne pas utiliser après la date de péremption imprimée sur la boîte et à la base du flacon.
- À utiliser dans les 30 jours suivant la première ouverture. Inscrivez la date de la première application sur la boîte (à l'endroit désigné). Après utilisation, éliminez l'emballage conformément à la réglementation locale.

#### **6. Autres informations**

Composition : 100 % huile d'olive BP.



Advena Ltd. Tower Business Centre,  
2nd Flr., Tower Street, Swatar, BKR 4013 Malta.



East Midlands Pharma Ltd, Unit 2a, Old Dalby Business Park,  
Leicestershire LE14 3NJ. UK.



Cerubaby is a trademark of Bausch & Lomb Incorporated or its affiliates.

© 2021 Bausch & Lomb Incorporated or its affiliates

04/2021

---

# **BAUSCH + LOMB**

Information médicale : + 33 (0) 4 67 12 30 30

P1FR01 / 555E01-06.21