

RHINICUR®

Mode d'emploi à lire attentivement, s.v.p.

F

GOUTTES NAsALES RHINICUR®

Dispositif médical

Chers parents, chers utilisateurs,

Votre choix s'est porté sur un dispositif médical éprouvé de haute qualité ! Les gouttes nasales Rhinicur® humectent, nettoient et libèrent la muqueuse nasale en cas de rhume et/ou de nez bouché.

Elles contiennent :

- d'hydrogencarbonate de sodium permettant une meilleure dissolution des sécrétions visqueuses et tenaces ainsi qu'une neutralisation des inflammations métaboliques
- du sulfate de potassium favorisant le décongestionnement de la muqueuse nasale et améliorant la circulation sanguine
- du sel de source naturel pour reminéraliser et revitaliser la muqueuse nasale

Composition :

100 ml de solution comporte : 1 g de mélange de sels minéraux, eau purifiée. Composition du mélange de sels minéraux en g/kg : sel de source naturel 50, hydrogencarbonate de sodium 205, chlorure de sodium 725, sulfate de potassium 20. Les gouttes nasales Rhinicur® sont garanties sans produits de conservation, sans gaz propulseur et sans substances allergènes d'origine végétale.

Domaines d'utilisation :

Les gouttes nasales Rhinicur® humectent, nettoient et libèrent la muqueuse nasale en cas de rhume et/ou de nez bouché ; elles sont efficaces dans le cas précis de rhume récurrents chez les nourrissons, même en cas d'utilisation de longue durée.

Posologie :

Appliquer une goutte nasale Rhinicur® dans chaque narine, une à plusieurs fois par jour, suivant les besoins. Veiller à maintenir l'extrémité du compte-goutte dirigée vers le bas, comme l'indique le schéma.



Recommandation :

Avant la première utilisation des gouttes nasales Rhinicur®, retirer le capuchon protecteur bleu, tenir le flacon avec l'embout du compte-gouttes dirigé vers le bas et pomper 8 à 10 fois, jusqu'à libération de la première goutte. Pour des raisons

d'hygiène, il est recommandé d'essuyer l'embout du compte-gouttes et de remettre le capuchon protecteur en place après chaque usage. En cas de non utilisation des gouttes Rhinicur® pendant une période plus ou moins longue, il faut nettoyer l'adaptateur en faisant sortir les premières gouttes en pompant, et en s'assurant que l'embout est libre et dirigé vers le bas.

Contre-indications :

Aucune contre-indication n'a été mentionnée jusqu'à ce jour.

Durée d'application :

Les gouttes nasales Rhinicur® ont une durée d'utilisation illimitée. Si malgré l'usage des gouttes Rhinicur® les symptômes devaient persister après 3 jours, il est recommandé de consulter un médecin.

Effets secondaires :

Aucun effet secondaire n'a été signalé jusqu'à présent pour un usage conforme aux instructions.

Attention :

Les gouttes nasales Rhinicur® ne contiennent pas de produits de conservation. Elles sont conditionnées dans un récipient, comportant un système de pompage spécial, qui assure l'usage des gouttes jusqu'à 6 mois après l'ouverture du flacon. Les gouttes Rhinicur® ne doivent pas être utilisées après la date de péremption, indiquée sur l'emballage. A ranger hors de la portée des enfants.

Recommandation :

20 ml de gouttes Rhinicur® pour le nez correspondent à environ 400 doses individuelles, ce qui est suffisant pour un traitement de plus de 3 mois, à raison de 2 x 2 gouttes par jour.

Forme pharmaceutique et conditionnement :

20 ml de solution à appliquer comme gouttes nasales.

Signification des symboles :



charge de fabrication



Date limite d'utilisation



Prière de bien vouloir observer la notice du paquet !



Conforme à la directive Européenne relative aux dispositifs médicaux

Dernière mise à jour des informations :

Mai 2007

Un produit de :

SIEMENS & CO
D-56119 Bad Ems

Distributeur :

ECOMAR SA
67 Rue du Luxembourg
F-59777 Euraille
www.rhinicur.com